



Instituto de  
**Biologia Molecular**  
do Paraná

## Guia para coleta de amostra de secreção de nasofaringe ou amostra nasal por swab

**A coleta deve ser realizada por profissional devidamente equipado com EPIs**




# Coleta de amostra de secreção de nasofaringe




Explicar ao paciente o procedimento que será realizado, informando-o que o mesmo deverá permanecer parado até o fim da coleta

1 2

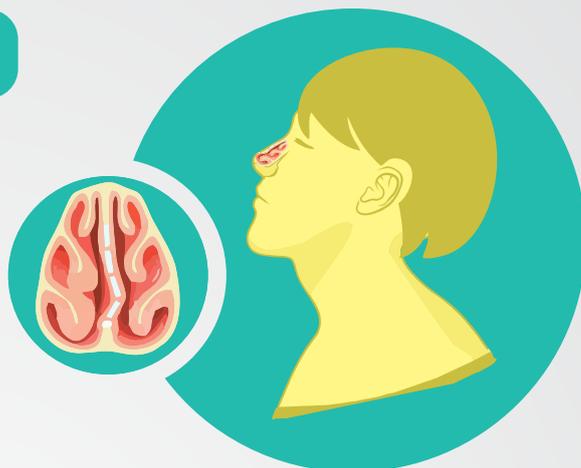

Perguntar ao paciente se existe desvio de septo ou preferência de qual narina a amostra deve ser coletada

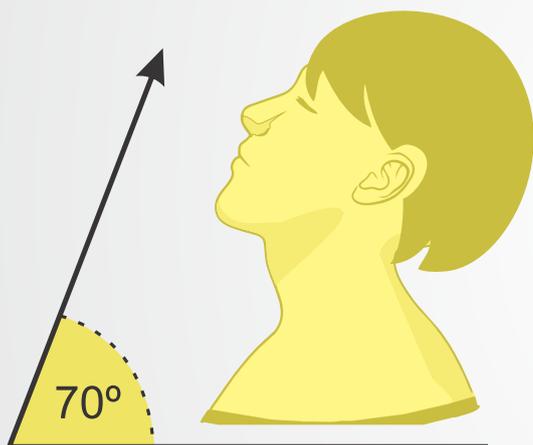


Inclinar a cabeça do paciente para trás cerca de 70°.

3 4




Gentilmente inserir o swab pela narina paralelamente ao palato até encontrar resistência, indicando o contato com a nasofaringe. A quantidade da haste do swab inserido não deve ultrapassar a distância equivalente entre a narina e a orelha do paciente.

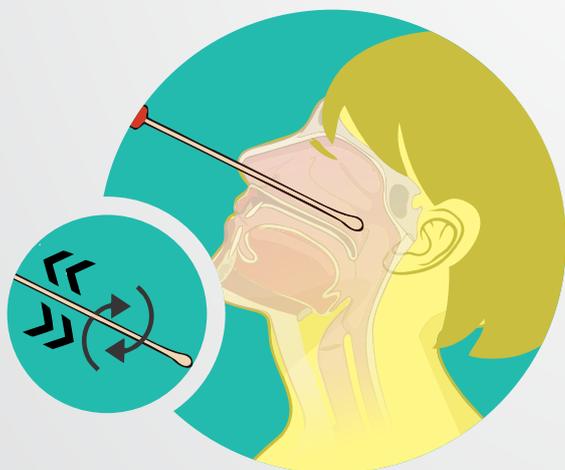

Fazer a coleta friccionando gentilmente o swab, girando-o, e mantendo o swab por alguns segundos no local para absorver as secreções.

5 6

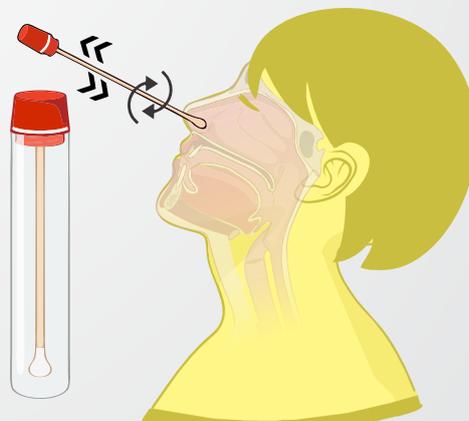

Remover o swab com rotações suaves e inseri-lo no tubo com tampão de corrida fornecido no kit. Seguir os procedimentos indicados na Instrução de uso do kit.


Não é necessário colher swab das duas narinas. Caso a coleta em uma narina do paciente ofereça resistência por desvio de septo ou alguma obstrução, use o mesmo swab para coleta pela outra narina do mesmo paciente.

# Coleta de amostra de secreção nasal




Explicar ao paciente o procedimento que será realizado, informando-o que o mesmo deverá permanecer parado até o fim da coleta

1 2

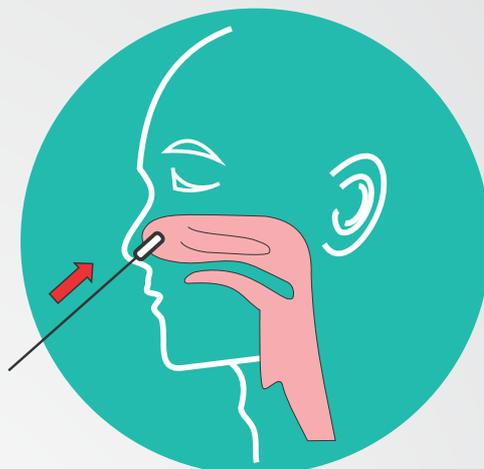


Inserir o swab na cavidade nasal

3 4

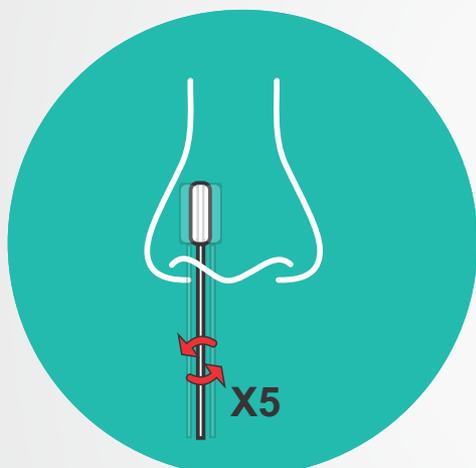


Pressionando o swab gentilmente contra as paredes da narina, gire 5 vezes, coletando a secreção do nariz

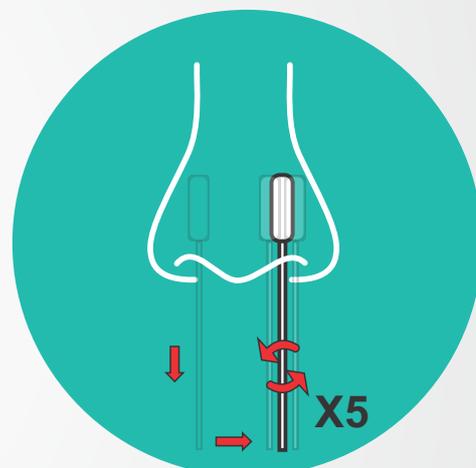

Pressionando o swab gentilmente contra as paredes da narina, gire 5 vezes, coletando a secreção do nariz

5

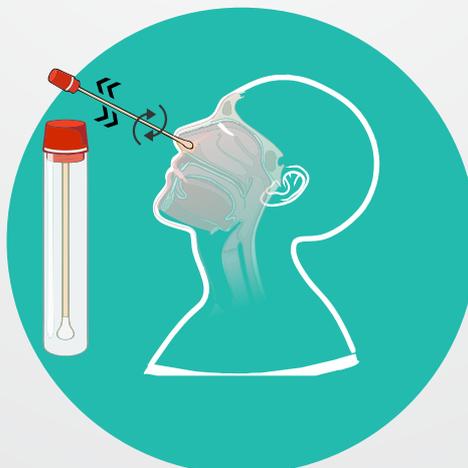

Remover o swab com rotações suaves e inseri-lo no tubo com tampão de corrida fornecido no kit. Seguir os procedimentos indicados na Instrução de uso do kit.